

Orbisana Digitale Lupe


Art.-Nr. 148025083

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktbeschreibung

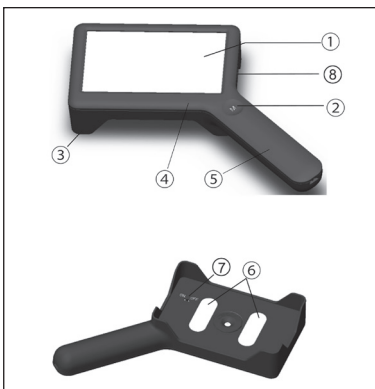

- 1 Monitor
- 2 Berührungsschalter
- 3 Plastikrahmen
- 4 Plastikabdeckung
- 5 Integrierter Akku
- 6 LEDs (6 Stück)
- 7 An/Ausschalter
- 8 Ladeanschluss

Zubehör: USB-Ladekabel (0,8 m, Typ C)

Technische Daten

- Linsengröße: 97 x 56 mm
- Vergrößerung: 3x / 5x / 10 x
- Licht: 6 x LED weiß
- Leistung: 3,7 V; 1.200 mAh
- Betriebszeit: 2 Std.
- Gewicht: ca. 145 g
- Maße: 181 x 143 x 32 mm

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Digitale Lupe ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

3. Sicherheitshinweise

3.1 Sicherheitshinweise Allgemein

Vorsicht

- Sehen Sie mit der Lupe nicht in die Sonne oder andere starke Lichtquellen.
- Richten Sie die LED-Beleuchtung nicht auf andere Personen und bündeln Sie mit der Lupe niemals das Sonnenlicht oder andere starke Lichtquellen.
- Halten Sie die Lupe fern von Hitzequellen und schützen Sie sie vor Stoß- oder Schlägeinwirkung, da andernfalls der Akku beschädigt werden könnte.
- Betätigen Sie die Lupe nicht mit nassen Händen.
- Benutzen Sie die Lupe niemals, wenn das Gerät beschädigt ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Behandeln Sie die Lupe stets mit Vorsicht und Sorgfalt.

3.2 Sicherheitshinweise Speziell

1. Prüfen Sie das Gerät und den Netzadapter mit Kabel auf sichtbare Schäden. Bei Schäden, trennen Sie den angeschlossenen Netzadapter sofort vom Stromnetz.
2. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

3.3 Sicherheitshinweise zu Batterien und Akkus

- Der Akku lässt sich nicht austauschen, versuchen Sie nicht diesen auszubauen
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, die Batterien können durch Überhitzung explodieren
- Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene Batterien oder Akkus nicht mit bloßen Händen berühren
- Versuchen Sie nicht das Gerät kurzzuschließen

Hinweis:

- Bitte achten Sie darauf, den Akku regelmäßig, mindestens aber einmal pro Monat aufzuladen.

4. Lieferumfang


- 1x Lupeleuchte
- 1x USD-Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

5. Montage // Inbetriebnahme

- a) Schalten Sie die Lupe mit dem An/Ausschalter (7) ein.
- b) Schalten Sie den Monitor mit dem Berührungsschalter (2) ein.

Mit dem Berührungsschalter können Sie die Vergrößerung verändern:

- Einmal berühren: 3fache Vergrößerung
- Zweimal berühren: 5fache Vergrößerung
- Dreimal berühren: 10fache Vergrößerung
- Viermal berühren: Monitor aus

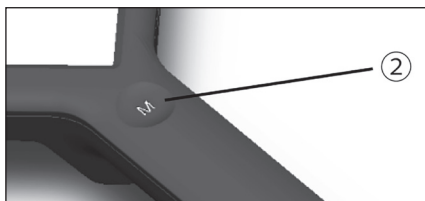

6. Pflege, Reinigung

Wenn der Bildschirm und das Objektiv verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab und verwenden Sie zum Abwischen keine harten Gegenstände wie Papier.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)